

imperial Wiertło trepanujące - REF. 229

do nietraumatycznej eksplantacji

- maksymalna głębokość preparowania 18,0 mm umożliwia bezpieczne usunięcie wszystkich śladów po implantach aktualnie dostępnych na rynku aż do średnicy 4,8 mm i maksymalnej długości całkowitej 18,0 mm
- laserowo naniesiona skala umożliwia określenie głębokości i precyzyjną pracę
- wyfrezowane w prześwity umożliwiają dobrą widoczność główki implantu i wspomagają chłodzenie przy eksplantacji nietraumatycznej
- narzędzie jest wykonane z utwardzonej nierdzewnej stali
- dla łatwiejszej identyfikacji na uchwycie narzędzia jest laserem zaznaczona wewnętrzna i zewnętrzna średnica narzędzia

do nietraumatycznej eksplantacji!

fájdalom mentes explantációhoz !



imperial Trepan fúró - REF. 229

trauma mentes explantációhoz


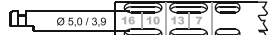

- a 18,0 mm maximális preparáció mélység lehetővé teszi a piacon elérhető összes implantátum márká biztonságos eltávolítását 4,8 mm átmérőig és 18,0 mm-es maximális teljes hosszig
- a szerszám derék részén lézerrel jelölt vonalak vannak, amelyek lehetővé teszik a preparálás mélységének pontos meghatározását és betartását
- A szerszámbe belemart ablakcskák jó rálátást nyújtanak az implantátum fejére és támogatják a hűtést a fájdalom mentes explantáció érdekében
- a szerszámok kikeményített rozsdamentes acélból készültek. A könnyű megkülönböztetés miatt a szerszám derék részén lézerrel ki van jelölve a szerszám belső és külső átmérője

Informacje dotyczące użytkowania:

używać w kątnicy z redukcją obrotów (minimalne obroty 10 : 1), preparację przeprowadzać wyłącznie w trakcie nieustannego chłodzenia specjalnym roztworem (roztwór fizjologiczny)
zalecane obroty : 800 - 1000 min⁻¹
max. obroty : 5000 - 6000 min⁻¹

Használati információk:

Használni a redukált sebességű könyökdarabot (10:1), preparálni csakis a permanensen hűtött steril folyadékkal
ajánlott fordulatszámok : 800 - 1000 min⁻¹
max. fordulatszámok : 5000 - 6000 min⁻¹

		Ø mm zewnętrzne / wewnętrzne külső / belső	L mm głębokość preparacji preparált mélység
	REF. 330 204 229 035	Ø 3,5 / 2,9	L18,0
	REF. 330 204 229 050	Ø 5,0 / 3,9	L18,0
	REF. 330 204 229 060	Ø 6,0 / 4,9	L18,0